

Anwendungs- und Sicherheitshinweise

CRYOTHERM GEL Pack



Appliziert lokale Kälte- und Wärmetherapie, indiziert für post-operative Beschwerden, Zerrungen, Verstauchungen oder zur Unterstützung eines REHA-Programms.

- Mikrowellen geeignet
- bleibt flexibel
- ungiftig
- Latex frei
- Größe 22,86 x 27,94 cm
-

VORSICHT:

Bitte Anleitung und Warnhinweise sorgfältig vor Gebrauch lesen. Wärme und Kälte können bei jedem unterschiedlich wirken. Orientieren Sie sich daran, wie Sie sich am wohlsten fühlen. Menschen mit Kreislaufproblemen sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie dieses Produkt benutzen. Hilfestellung ist notwendig, wenn die Nutzung durch Kinder oder hilfsbedürftige Erwachsene erfolgt. Dieses Produkt ist ungiftig und nicht essbar. Werfen Sie das Produkt weg, wenn es undicht ist.

WARNHINWEISE:

Nur nach Anleitung anwenden. Beobachten Sie das Gel Pack bei Erwärmung in der Mikrowelle. Falls es sich ausdehnt, bitte Mikrowelle abschalten. Die Aufwärmzeit basiert auf der Annahme, dass das Gel Pack Raumtemperatur hat. Sollte es vorher im Kühlschrank/Gefrierfach gewesen sein, bringen Sie es bitte auf Raumtemperatur und folgen dann der empfohlenen Aufwärmzeit. **DAS GEL PACK BITTE NICHT MEHR ALS ZWEIMAL INNERHALB EINER STUNDE ERWÄRMEN!** Falls zusätzliche Wärmebehandlungen gewünscht sind, warten Sie bitte eine Stunde, bevor Sie das Pack wieder

erwärmen. ÜBERMÄSSIGES ERHITZEN KANN BEWIRKEN; DASS DAS GEL PACK REISST, UNDICHT WIRD ODER VERBRENNUNGEN VERURSACHT. Einige Körperteile können empfindlicher auf Wärme reagieren. Prüfen Sie, ob die Temperatur angenehm ist, bevor sie das Pack auf die zu behandelnde Stelle bringen. Einige Teile des Packs könnten in der Mikrowelle zu heiß werden. Bitte Vorsicht bei der Entnahme des Gel Packs aus der Mikrowelle.

ANLEITUNG FÜR WÄRMETHERAPIE:

Mikrowelle


1. Legen Sie das Gel Pack flach in die Mikrowelle. Erhitzen Sie es bei 1200W für 75 Sekunden.
2. Nehmen Sie das Gel Pack aus der Mikrowelle und prüfen Sie, ob die Temperatur für Sie angenehm ist. Die Temperatur wird noch ein wenig ansteigen. Sollten Sie mehr Wärme wünschen, erwärmen Sie das Gel Pack nochmals um maximal 10 Sekunden.
3. Platzieren Sie es in die dafür vorgesehene Tasche des Disc Unloaders und bringen diesen dann wie empfohlen an Ihrem Körper an.

Topf

1. Bringen Sie Wasser in einem Topf zum Kochen und nehmen Sie den Topf dann von der Herdplatte.
2. Platzieren Sie das Gel Pack vorsichtig im heißen Wasser.
3. Entnehmen Sie vorsichtig das Gel Pack mit Hilfe einer Zange oder Ähnlichem nach 8 bis 10 Minuten.
4. Platzieren Sie es in die dafür vorgesehene Tasche des Disc Unloaders und bringen diesen dann wie empfohlen an Ihrem Körper an.

ANLEITUNG FÜR KÄLTETHERAPIE

1. Legen Sie das Gel für mindestens eine Stunde in den Gefrierschrank.
2. Entnehmen Sie das Pack, platzieren Sie es in die dafür vorgesehene Tasche des Disc Unloaders und bringen diesen dann wie empfohlen an Ihrem Körper an.
3. Bitte wenden Sie die Kühltherapie ununterbrochen nicht länger als 20 Minuten an.

Hersteller: Corflex Inc., 669 East Industrial Park Drive, Manchester, NH, USA, 03109-5625  EU-
Repräsentant: Medical Product Service GmbH, Borngasse 20, D-35619 Braunfels

Vertrieb: top-medical UG (haftungsbeschränkt) · Pücklerstr. 37 · 14195 Berlin ·
www.top-medical.de

Stand: September 2012