

DISC UNLOADER SPINAL ORTHOSIS **Bandscheibentlastungsorthese**

Diese Bandscheibentlastungsorthese, von führenden Fachärzten und Physiotherapeuten entwickelt, bietet Erleichterung bei chronischen oder akuten Rückenschmerzen durch Verlagerung des Drucks von der Lendenwirbelregion auf den Abdominalbereich. Der Komfort des Patienten war bei der Entwicklung oberste Priorität. Das modulare Design dieser vielseitigen Wirbelsäulenorthese – hergestellt aus einem leichten atmungsaktiven Stoff – ermöglicht, dass sie während des gesamten Behandlungszeitraums getragen werden kann. Sie stabilisiert und unterstützt, ohne im Alltag einzuschränken.

Der einzigartige modulare Aufbau reduziert den intradiskalen Druck durch umlaufende Kompression. Die Orthese beinhaltet sowohl eine starre vordere Platte als auch eine unbiegsame Einlage für das Rückenelement. Außerdem ist ein Gel-Pack beigefügt, das in die hintere Tasche des Rückenelements eingelegt werden kann, um die Vorteile einer lokal applizierbaren Kälte- oder Wärmetherapie nutzen zu können.

Mögliche Indikationen:

- bei chronischen oder akuten Schmerzen im unteren Rückenbereich
- bei einem Bandscheibenvorfall
- als post-operative Anwendung
- bei Ischiasbeschwerden
- bei Zerrungen / Verstauchungen der Lendenmuskulatur / Bänder
- bei Haltungsschäden

Kontraindikationen

- Durchblutungsstörungen
- Ausgeprägtes Schmerzempfinden

Sollten Schwellungen, Schmerzen, Hautirritationen oder andere, ungewöhnliche Reaktionen auftreten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Der Disc Unloader besteht aus

1. konturiertem vorderem Element als Unterleibsstütze (mit „Bauchplatte“ 25,4 cm)
2. Rückenelement (mit „Rückenplatte“, 22,86 cm)
3. Spannungsgurten
4. wiederverwendbarem Gel-Pack für Kälte-/Wärmetherapie (passend für Tasche im Rückenelement), siehe separate Anwendungshinweise

Verwendete Materialien:

Elemente und Spannungsgurte = Nylon, Polyester, Polyether,

Bauch- und Rückenplatte: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Gel-Pack: Polybag, Glyzerin

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Gebrauchsanweisung:



Abb. 1 Rückansicht

Abb. 2 Vorderansicht

Abb. 3 Rückenplatte

1. Klettverschlüsse öffnen. Die Bandage flach ausbreiten.
2. Hinweis: Starre Einsätze können aus den Taschen entfernt werden, nach Anleitung erwärmt, individuell angepasst und wieder eingesetzt werden. Oder die Bandage kann ohne Einsätze verwendet werden. Sollten Sie die Vorteile der lokalen Kälte- oder Wärmetherapie nutzen wollen, platzieren Sie bitte das Gel-Pack (nach Anwendungsbeschreibung) in der entsprechenden Tasche.
3. Positionieren Sie das vordere flache Element mittig auf dem Unterleib. Beachten Sie, dass der Klettverschluss nach außen zeigt und die Krümmung nach unten ausgerichtet ist.
4. Positionieren Sie das Rückenelement mittig auf Ihrem Rücken. Beachten Sie, dass das Corflex Logo und die beiden elastischen Spannungsgurte nach außen zeigen (Abb. 1).
5. Ziehen Sie beide Seiten des Rückenelements nach vorne und befestigen diese mithilfe des Klettverschlusses auf dem vorderen Element.
6. Halten Sie die beiden elastischen Spannungsgurte fest. Ziehen Sie einen Gurt nach vorn und befestigen ihn auf dem Klettverschluss des vorderen Elements. Anschließend ziehen Sie den zweiten Gurt darüber und befestigen diesen auf dem ersten.
7. Regulieren Sie die Spannung der Gurte (nicht zu fest anziehen).

Größe	Artikelnummer	Maße in cm (Taillenumfang)
XS		63.5 - 76.2
S	35-4101	76.2 - 88.9
M	35-4102	88.9 - 101.6
L	35-4103	101.6 - 114.3
XL	35-4104	114.3 – 127.0
2XL	35-4105	127.0 - 139.7
3XL	35-4106	139.7 - 152.4
4XL	35-4107	152.4 - 165.1
		Abmessungen in cm
Gel-Pack	72-7006	22.86 x 25.4

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.

Hersteller: Corflex Inc., 669 East Industrial Park Drive, Manchester, NH, USA, 03109-5625 

EU-Repräsentant: Medical Product Service GmbH, Borngasse 20, D-35619 Braunfels

Vertrieb: TOP-MEDICAL UG (haftungsbeschränkt), Pücklerstr. 37, D-14195 Berlin, www.top-medical.org

Stand: September 2012