

CRYOTHERM KNEE WRAP

Cryothermische Kniewickel/-bandage

Das anatomische Design ermöglicht Kompression und gezielte Wärme-/Kältebehandlung am Knie.

*Mögliche Indikationen:*

- nach einer OP
- bei Arthritis
- Zerrungen / Verstauchungen
- zur Unterstützung bei der REHA

- aus weichem, atmungsaktiven laminierten Schaumstoff; ausgestattet mit Klettverschlüssen und Taschen für wieder verwendbare Kühlkompressen

**Artikelnummern**

	<b>mit 2 Taschen</b>	<b>mit 3 Taschen</b>
<b>ohne Kühlkompressen</b>	72-7020	72-7080
<b>mit 2 Kühlkompressen</b>	72-7022	
<b>mit 3 Kühlkompressen</b>		72-7083
<b>mit 4 Kühlkompressen</b>	72-7024	
<b>mit 6 Kühlkompressen</b>		72-7086

Passt bis zu einem Beinumfang von 61 cm  
(ca. 10 cm über der Kniescheibe gemessen)

**zusätzliche Kühlkompressen** (Maße: 14 cm x 28 cm) **erhältlich:**

<b>1 Stk</b>	72-7001
<b>10er Pkg</b>	72-7000

Gebrauchsanweisung:

1. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für die Anwendung der Kühlkompressen.
2. Verwenden Sie pro Tasche nur eine Kühlkomresse und schließen Sie die Taschen richtig.
3. Richten Sie die Bandage so aus, dass die Öffnung mit der grauen Schaumstoffseite nach außen zeigt und genau über der Kniescheibe sitzt.
4. Ziehen Sie die drei Druckgurte an, bis sie eine angenehme Unterstützung bieten.

Pflege und Reinigung:

*Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:*

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter [info@top-medical.org](mailto:info@top-medical.org)

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.