

CRYOTHERM BACK WRAP  
Cryothermische Rückenorthese

Das anatomische Design ermöglicht Kompression und gezielte Wärme-/Kältebehandlung am Rücken.

*Mögliche Indikationen:*

- nach einer OP
- bei akuter Arthritis
- Zerrungen / Verstauchungen
- zur Unterstützung bei der Reha
- bei Nervenirritation

- aus weichem, atmungsaktiven laminierten Schaumstoff; ausgestattet mit Klettverschlüssen und Taschen für wieder verwendbare Kühlkompressen

**Artikelnummern**

<b>ohne Kühlkompressen</b>	72-7040
<b>mit 2 Kühlkompressen</b>	72-7042
<b>mit 4 Kühlkompressen</b>	72-7044

Paßt bis zu einem Taillenumfang von 122 cm

**zusätzliche Kühlkompressen** (Maße: 14 x 28 cm) **erhältlich:**

<b>1 Stk</b>	72-7001
<b>10er Pkg</b>	72-7000

Gebrauchsanweisung:

1. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für die Anwendung der Kühlkompressen.
2. Verwenden Sie pro Tasche nur eine Kühlkomresse und schließen Sie die Taschen richtig.
3. Zentrieren Sie die Bandage nun am Kreuz und ziehen Sie die linke Seite fest über das Mittelteil und fixieren es. Wiederholen Sie das mit der rechten Seite.
4. Befestigen Sie die beidseitigen Spannungsgurte am Klettverschluß, so dass die Bandage bequem anliegt.
5. Bei Wärmeanwendung bitte Kühlkompressen in einem Wasserbad erhitzen (Ofen, Herd, Mikrowelle)

Pflege und Reinigung:

*Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:*

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter [info@top-medical.org](mailto:info@top-medical.org)

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.