

ULTRA FIT WRIST SPLINT
Super-Passform Handgelenkschiene

Die Schiene ist einfach mit einer Hand anzulegen, stützt das Handgelenk angenehm, während die Finger uneingeschränkt beweglich bleiben.

Mögliche Indikationen:

- Karpaltunnelsyndrom
- Sehnenscheidenentzündung
- Handgelenkzerrungen oder –verstauchungen
- nach der Abnahme eines Gipsverbands

- aus einem haltbaren, federleichten Material, mit einer abnehmbaren Handflächenschiene aus Aluminium, einer flexiblen Handrückenfixierung und Klettverschlüssen

Artikelnummern

	20 cm Länge rechts	20 cm Länge links	25 cm Länge rechts	25 cm Länge links
Einheitsgröße	73-1000	73-1001	73-1040	73-1041
XS	73-1002	73-1012	73-1042	73-1052
S	73-1003	73-1013	73-1043	73-1053
M	73-1004	73-1014	73-1044	73-1054
L	73-1005	73-1015	73-1045	73-1055
XL	73-1006	73-1016	73-1046	73-1056

Maßtabelle

Einheitsgröße	13 – 23 cm
S	10 – 13 cm
M	13 – 15 cm
L	15 – 18 cm
XL	18 – 20 cm
2XL	20 – 23 cm

Maße beziehen sich auf den Umfang des Handgelenks

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.

Gebrauchsanweisung:

1. Öffnen Sie die Schiene und legen sie mit der Innenseite nach oben flach auf den Tisch.
2. Legen Sie Ihre Hand so auf die Schiene, dass die Handflächenschiene bequem in Ihrer Hand liegt. (Die Schiene kann der Wölbung Ihrer Handfläche angepasst werden)
3. Legen Sie nun die Verstärkungsstreben mittig auf Ihr Handgelenk, so dass sie das Handgelenk bequem umschließen.
4. Ziehen Sie den Gurt mit dem Klettverschluss zwischen Zeigefinger und Daumen und fixieren ihn oben auf der Schiene.
5. Fädeln Sie die Seitengurte durch die Plastikschnallen und ziehen sie so stark an, bis sie Ihr Handgelenk angenehm stützen. Fixieren Sie sie mit den Klettverschlüssen.

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Entfernen Sie zur Reinigung sämtliche Streben soweit möglich, schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org