

E/N LUMBAR SUPPORT

Elastische Neopren Lumbalorthese

Diese Bandage passt sich durch den abgeschrägten Verschluss optimal Ihrer Figur an. Das neoprenverstärkte Rückenteil ist mit einer integrierten Tasche (für eine thermoplastische Stützeinlage, eine Kältekompressen oder eine Akupressur-Einlage – *sind separat erhältlich*) ausgestattet. Beidseitige Spannungsgurte sorgen für zusätzlichen Halt.

Mögliche Indikationen:

- mittlere bis starke Rückenschmerzen
- muskuläre Dysbalance
- allgemeine Rückenmuskelschwäche
- Zerrungen / Verstauchungen des unteren Rückens
- Lendenwirbelinstabilität / Wirbelgleiten

- aus hochwertigen Materialien

Artikelnummern

	beige	schwarz
XS	77-6220	77-6120
S	77-6221	77-6121
M	77-6222	77-6122
L	77-6223	77-6123
XL	77-6224	77-6124
2XL	77-6225	77-6125
3XL	77-6226	77-6126
4XL	77-6227	77-6127

mögliche Einlagen

Thermoplastische Stützeinlage	37-6031
Kältekompressen	72-7006
Akupressureinlage	77-9999

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.

Maßtabelle

XS	46- 61 cm
S	61 – 76 cm
M	76 – 91 cm
L	91 – 106 cm
XL	106 – 122 cm
2XL	122 – 132 cm
3XL	132 – 142 cm
4XL	142 – 152 cm

Maße beziehen sich auf den Hüftumfang

Gebrauchsanweisung:

1. Die Bandage flach ausbreiten. Die Oberseite befindet sich beim Tascheneingriff.
2. Bei Verwendung einer Strebe, diese in die Tasche schieben.
3. Zentrieren Sie die Bandage nun am Kreuz.
4. Ziehen Sie die linke Seite fest über das Mittelteil und fixieren es. Wiederholen Sie das mit der rechten Seite. Wenn nötig, die beidseitigen Spannungsgurte am Klettverschluss befestigen.
5. Wenn die Bandage mit Hosenträgern geliefert wird, ziehen Sie diese über die Schultern und regulieren die Länge mit den Schnallen (*Hosenträger sind abnehmbar*).

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Entfernen Sie zur Reinigung sämtliche Streben soweit möglich, schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org