

MEDIC-AIR SEAT CUSHION
Medizinisches Sitzkissen

Das Kissen ermöglicht bequemes und stressfreies Sitzen; einfach, schnell, mobil verwendbar durch aufblasbare Luftkammern.

Geeignet:

- bei Druckstellen
- Unterwegs für Veranstaltungen
- als Rollstuhlaufgabe
- bei Steißbein- und Rückenbeschwerden

- aus hochwertigem mit Nylon beschichteten Vinyl mit Sicherheitsventil (*auch für medizinische Zwecke*)

Artikelnummern		
	1 Stk	12er Pkg
schwarz	84-5052-100	84-5052-300

Maße 46 cm x 41 cm

Gebrauchsanweisung:

1. Das Kissen vollständig entfalten.
2. Kissen behutsam aufblasen (*es sollte eher etwas weicher als zu fest sein, um die Vorteile der Luftpolsterung nutzen zu können*).
3. Das Ventil gut verschließen (*sollte es feststecken, leicht anfeuchten*).

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen. Sie können Desinfektionsmittel oder eine milde Seife verwenden. Niemals Reinigungsmittel benutzen. Das Kissen an der Luft trocknen, nie maschinell.

Bestellung unter info@top-medical.org