

CALF SLEEVE

Wadenbandage

Diese Bandage stützt, wärmt und sorgt für Kompression an der Wade.

Mögliche Indikationen:

- Wadenzerrungen
- Verletzungen der Wadenmuskulatur
- Reizung der Schienbeinmuskulatur

- aus hochwertigem latexfreien Neopren

Artikelnummern

30 cm Länge	
XS	88-1412
S	88-1413
M	88-1414
L	88-1415
XL	88-1416

Maßtabelle

XS	30 – 33 cm
S	33 – 35 cm
M	35 – 38 cm
L	38– 43 cm
XL	43 – 46 cm

Maße beziehen sich auf die breiteste Stelle der Wade

Gebrauchsanweisung:

1. Mit der schwarzen Seite der Bandage nach außen in die größeren Öffnung mit dem Fuß zuerst in die Bandage schlüpfen und sie über die Wade ziehen.
2. Die Naht sollte sich an der Rückseite des Beins befinden.
3. Richten Sie die Bandage nach Bedarf aus.

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.