

## THIGH SLEEVE

### Schenkelbandage

Diese Bandage stützt, wärmt und sorgt für Kompression am Schenkel und in der Leistengegend.

#### *Mögliche Indikationen:*

- Verletzungen der Oberschenkelmuskulatur

- aus hochwertigem latexfreien Neopren

#### **Artikelnummern**

<b>28 cm Länge</b>	
<b>XS</b>	88-1512
<b>S</b>	88-1513
<b>M</b>	88-1514
<b>L</b>	88-1515
<b>XL</b>	88-1516

#### **Maßtabelle**

<b>XS</b>	46 – 48 cm
<b>S</b>	48 – 51 cm
<b>M</b>	51 – 56 cm
<b>L</b>	56 – 63 cm
<b>XL</b>	63 – 71 cm

Maße beziehen sich auf die breiteste Stelle des Oberschenkels

#### Gebrauchsanweisung:

1. Mit der schwarzen Seite der Bandage nach außen, in die größeren Öffnung, mit dem Fuß zuerst, in die Bandage schlüpfen und sie über den Schenkel ziehen.
2. Die Naht sollte sich an der Rückseite des Beins befinden.
3. Richten Sie die Bandage nach Bedarf aus.

#### Pflege und Reinigung:

*Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:*

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter [info@top-medical.org](mailto:info@top-medical.org)

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.

top-medical UG (haftungsbeschränkt) · Pücklerstr. 37 · 14195 Berlin · [www.top-medical.de](http://www.top-medical.de)