

TARGET ELBOW SLEEVE W/PAD
Gepolsterte Ellenbogenbandagen

Diese Bandage stützt, wärmt und sorgt für Kompression mit einem extra Polster über dem Ellenbogen für zusätzlichen Schutz.

Mögliche Indikationen:

- Verletzungen des Ellenbogens
- Schutz bei sportlichen Aktivitäten
- Schleimbeutelentzündungen

- aus hochwertigem latexfreien Neopren

Artikelnummern	
23 cm Länge	
S	88-3063
M	88-3064
L	88-3065
XL	88-3066
2XL	88-3067

Maßtabelle	
S	20 – 23 cm
M	23 – 25 cm
L	25 – 28 cm
XL	28 – 30 cm
2XL	30 – 35 cm

Maße beziehen sich auf die breiteste Stelle des Unterarms

Gebrauchsanweisung:

Mit der schwarzen Seite der Bandage nach außen die größere Öffnung zuerst über den Arm streifen und über den Ellenbogen ziehen.

Das Polster sollte sich über dem Ellenbogen befinden.

Richten Sie die Bandage nach Bedarf aus.

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.

top-medical UG (haftungsbeschränkt) · Pücklerstr. 37 · 14195 Berlin · www.top-medical.de